

METAL PRIMER II

prošíředek pro vazbu pryskyřic ke kovům

METAL PRIMER II obsahuje speciální monomer (MEPS) (biološorečný metakrylát) , který zprostředkuje vazbu akrylových pryskyřic a kompozit ke všem druhům kovů.

Doporučené použití:

Vazba akrylových a kompozitních pryskyřic ke všem typům kovů podle návodu k použití.

Poznámky a kontraindikace:

1. Pro použití pouze stomatologové a zubní techniky v doporučených Indikacích.
2. Obsahuje metakrylát. Neměl by být použit personálem nebo pacienty, kteří vykazují alergii na metakrylát. V případech alergické reakce vyhledejte lékařskou pomoc.
3. V případě kontaktu s pokožkou nebo očima okamžitě vyptáchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
4. Hořlavé. Zabraňte styku s vysokou teplotou, s přímým slunečním světlem a zdroji tepla. Používejte v dobře větraných místnostech.
5. Těkavé. Uzavřete lahvičku okamžitě po použití.
6. Určete šletoček (č. 7) pro použití POUZE s METAL PRIMER II.

Návod k použití:

Obecně ve všech případech

1. Opískujte povrch kovů aluminíum oxidovým pískem a očistěte proudem vzduchu.
Poznámka: Zabraňte kontaminaci olejů, separátorem nebo vlhkostí z prstů atd.
2. Aplikujte 2-3 kapky METAL PRIMER II do mísičky nebo podobné nádoby. Za použití šletočky aplikujte na vazný povrch tenkou vrstvu. Nechte vyschnout.
Poznámka: Druhá vrstva může být aplikována, jestliže je to nutné.
3. Aplikujte pryskyřici na kov jak je popsáno níže.
Poznámka: Pryskyřici aplikujte na kov okamžitě poté, kdy je povrch připraven.

Doporučené aplikace:

1. Pryskyřičný cement ke kovům na kovové inleze, korunky a můstky.
a) Připravte povrch kovů, jak je popsáno výše a připovněte práci pryskyřičným cementem.
2. Opaquer pryskyřice na kov pro zhotovení kompozitních fazet a korunek.
a) Připravte povrch jak je popsáno výše a aplikujte opaquer (GC THERMOPRESIN LC II) běžným způsobem. Vytvrďte podle doporučení výrobce.
3. Baza pryskyřičná náhrady k magnetickým attachmentům.
a) Připravte povrch jak je popsáno výše a připovněte attachment běžným způsobem za použití samotuhnoucí akrylové pryskyřice (GC UNIFAST).