

# SOLDER LV

Univerzální pájka

Pájecí tyčinky - trubičky, jsou vyrobené speciální technologií tak, aby se po roztavení neuzavíraly. Tato konstrukce umožňuje opakované pájení, z jedné tyčinky asi 20x.

Pájecí pasta je uzavřena v trubičce, což maximálně zjednodušuje použití této pájky.

Odvzdušňovací kanálek, kterým unikají plyny a páry tvořící se při zahřívání pájky, zamezí tomu, aby došlo k "explozi" zahřáté pájecí pasty uvnitř trubičky.

## Použití:

## Velmi snadné pájení a oprava porazit

všech dentálních kovů a jejich slitin s teplotou tavení vyšší než 800 C.

## Postup práce:

- Zahřejte pájku do požadované teploty (třeslově červená barva) aniž oddělíte plamen, abyste zabránili oxidaci kovů.
- Pájecí tyčinku přiložte na místo pájení (Tyčinku držte ve vodorovné poloze. Tak zajistíte, aby vám pájecí pasta namírně nevytékala.), pájka se okamžitě roztaví.
- Nyní oddalte plamen a pájené místo ochlad'te ponořením do vody.
- Očistěte pájecí místo od zbytků pájecí pasty a oxidů.

Pro pájení je možno použít například hořák B(zazr. 1000 z našeho katalogu).

## balení:

obj.č.: SOLDER LV  
SOLDER LV-12

balení 1ks - délka 25 cm. 1,2g  
balení 12ks

cena: 60,- Kč  
690,- Kč